

СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА ЭНДОДЕЗ-"КРОНТ" К КАНАЛАМ ЭНДОСКОПА RENTAX

КОЛПАЧОК 0008 ДЛЯ ОБРАБОТКИ
АСПИРАЦИОННОГО КАНАЛА

КОННЕКТОР
МАГИСТРАЛЕЙ

КОЛПАЧОК 0002, ДЛЯ ОБРАБОТКИ
КАНАЛА ВОДА/ВОЗДУХ

АДАПТЕР 0007,
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К КАНАЛУ ВОДА/ВОЗДУХ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН

СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА,
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К АСПИРАЦИОННОМУ КАНАЛУ

ФИЛЬТР ЗАБОРНЫЙ

ДРОССЕЛЬ 0005 КОМБИНИРОВАННЫЙ,
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КАНАЛА

Компания КРОНТ
Тел. / факс: (495) 500 48 84

Интернет: WWW.KRONT.COM
КРОНТ.РФ


ЭНДОДЕЗ® - "КРОНТ"

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭНДОСКОПОВ

Предназначено для обработки каналов гибких эндоскопов, полых хирургических инструментов, катетеров, многоразовых трубок и др., а также ополаскивания водой и удаления влаги продувкой воздухом и промыванием спиртом на этапах окончательной (окончательной, совмещенной с дезинфекцией), предстерилизационной очистки, дезинфекции высокого уровня.



ОБРАБОТКА КАНАЛОВ ЭНДОСКОПА RENTAX

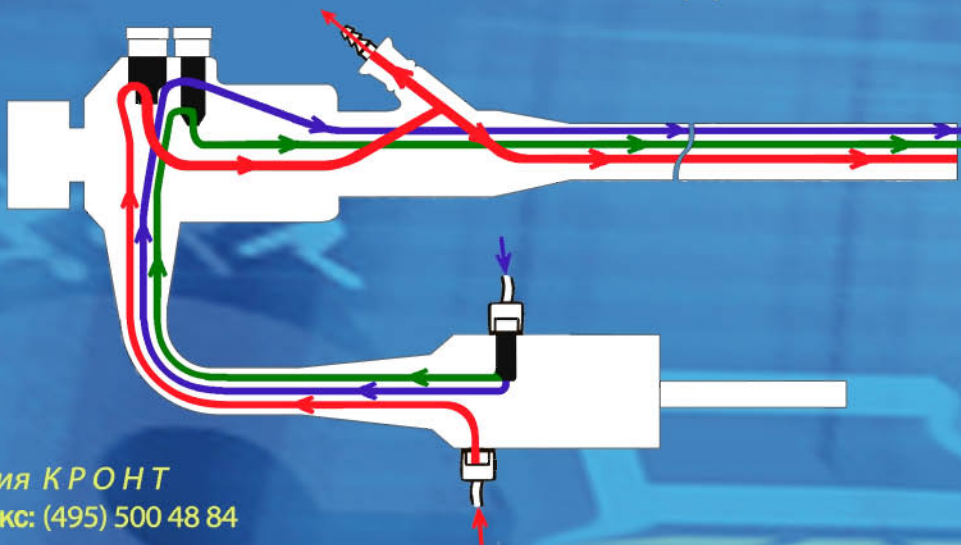

- Вода
- Воздух
- Аспирация